

Ømme fødder? Trætte ben?

Styrk dit fundament med Senzone GO

Mange af os går rundt med smerter i fødder, knæ eller hofter. Og ja – det kan være en del af jobbet. Men skal det være sådan?



Tør du sige det højt?

Måske er det ikke skoen – men sålen, der er problemet.

Vores ortopædiske skomager har udviklet en standard-indlægssål, der passer til både arbejde og fritid – med udgangspunkt i det vigtigste: dine fødder.

Hvad tilbyder vi?

- En løsning der passer direkte i arbejdssko, sneakers og støvler – klar i str. 36–48
- Effektiv støtte til hæl, svang og forfod, som aflaster hele kroppen
- Lindring af typiske fodproblemer som hælsore og nedsunken forfod mm.
- Mulighed for testforløb i 2 uger for 1–2 medarbejdere

Hvorfor skal du & dine kollegaer tage det alvorligt?

Mindre træthed = mere energi og overskud

Bedre trivsel = gladere medarbejdere


Vil du opleve forskellen med Senzone GO?

Så kunne det måske være noget, dine kolleger også ville have glæde af at høre om – måske over en kop kaffe eller i frokostpausen. Det kan også være, at din arbejdsplads er åben for at støtte op om sunde fødder og bedre trivsel – nogle vælger fx at give et tilskud over lønnen.



Claus Pedersen
Salg
+45 60 98 11 95
cp@senzzone.dk

Læs mere om vores løsning her

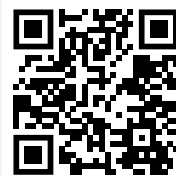

senzzonego.com/firmaaftale

Det koster ikke noget at tage en snak. Men det kan koste på trivslen, hvis ingen gør noget.

Så nemt er det:

Senzone GO



Udskift dine gamle såler

For at få den fulde effekt af Senzone GO, skal du fjerne de originale såler fra dine sko og erstatte dem med dine nye Senzone GO såler. Dette sikrer den bedste pasform og komfort.



Placér dine nye såler korrekt

Når du har fjernet de originale såler, skal du placere dine Senzone GO såler i skoene. Sørg for, at de ligger godt i hælen og passer ved tæerne. Sålerne må hverken være for lange eller for korte, og de skal ligge fast i skoene uden at glide rundt.



Tilvænning af dine nye såler

Det kan tage mellem 1-2 uger for dine fødder at vænne sig til de nye Senzone GO såler. Det er helt normalt at opleve en kort periode med tilpasning, da dine fødder skal vænne sig til den nye støtte og komfort.



Vil du vide mere?

Scan QR-koden og få flere informationer om vores løsning til din arbejdsplads.